

Nuestro programa consta usualmente

de 12 a 24 sesiones de terapia que puede incluir:

- Terapia Anodyne para reducir temporalmente el dolor y aumentar la circulación de los tejidos y nervios;
- Los ejercicios de estiramiento y fortalecimiento;
- Ejercicio de equilibrio dinámico y estático;
- Masaje y otras modalidades terapéuticas para el dolor;
- Las técnicas de integración sensorial para optimizar el tratamiento

1.

En primer lugar, su terapeuta o médico coloca las almohadillas flexibles de Terapia Anodyne en el área de tratamiento.



2.

Ajuste el poder regulador de la intensidad que mejor se adapte a su caso



3.

Así que relájese y disfrute de la suave calidez de las pastillas como la circulación aumenta dando una sensación de calor.

PROGRAMA DE TERAPIA® ANODYNE. INFORMACION DEL PACIENTE

Nos complace informar a nuestros pacientes que tenemos una nueva terapia llamada Sistema de Terapia® Anodyne. Han sido reconocidas excelentes mejoras clínicas en relación con todo tipo de lesiones, incluyendo la neuropatía diabética, una mayor sensibilidad, el equilibrio y la capacidad de caminar. Esta terapia de infrarrojos reduce o elimina el dolor, la curación de las heridas crónicas y reduce el tiempo de curado de las lesiones y cirugías. El Sistema Anodyne está certificado por la Comunidad Europea (CE) y la FDA. Ha sido utilizado de manera segura en miles de pacientes en los Estados Unidos y América Latina.

¿Qué es normal que se sienta durante el tratamiento?

Anodyne no es invasivo, ni es una droga, y es seguro. Cuando se utiliza esta terapia los pacientes sienten una sensación confortable de calor. Si usted siente demasiado calor debe decírselo a su terapeuta. La luz infrarroja liberando el óxido nítrico ayuda a reducir el dolor y aumentar la circulación a los nervios, las heridas, los músculos lesionados y las articulaciones. No hay condiciones o medicamentos que están contraindicados se sigue las recomendaciones del fabricante.

¿Qué más cosas puede sentir?

- Después del tratamiento es normal el color rosáceo de la terapia en un área por debajo de las almohadillas. Esto es debido a la dilatación de los vasos sanguíneos y debe desaparecer después de aproximadamente una hora.
- Usted puede experimentar alguno hormigueo o ardor - sobre todo si tiene los pies o las piernas entumecidas. Es una excelente señal de que el flujo de sangre está llegando a sus nervios y no debe interrumpir el tratamiento. De hecho, se recomienda aplicar el tratamiento más frecuentemente durante esta fase. Durante los primeros 3-6 tratamientos, pueden aparecer picos de dolor porque los nervios son estimulados al recibir más sangre. Completar la terapia es la cosa más importante que puede hacer para recuperar la sensación y el equilibrio. ¡Adelante!
- Si usted es diabético puede necesitar menos insulina. Controle el azúcar en sangre con más frecuencia para evitar la glucosa baja.
- Si usted tiene una herida, puede ver un aumento en el líquido limpio debido a aumento de la circulación. Esta es una buena señal de que el flujo de sangre está llegando a la herida.
- Sus uñas pueden crecer una vez que el flujo sanguíneo se restaura.
- Su piel puede sudar más en el área tratada - especialmente si usted tiene edema.
- La piel muerta caerá debido a la regeneración de la misma.

Todos estos acontecimientos reflejan un aumento en el flujo sanguíneo hacia las áreas que lo necesitan, ayudándoles a curar. Não debe por isso dejar el tratamiento a la mitad. Si usted tiene alguna pregunta consulte con su terapeuta.